


— 50 —
years of italian excellence



Pozrite si našu kompletnú ponuku na www.bays.sk

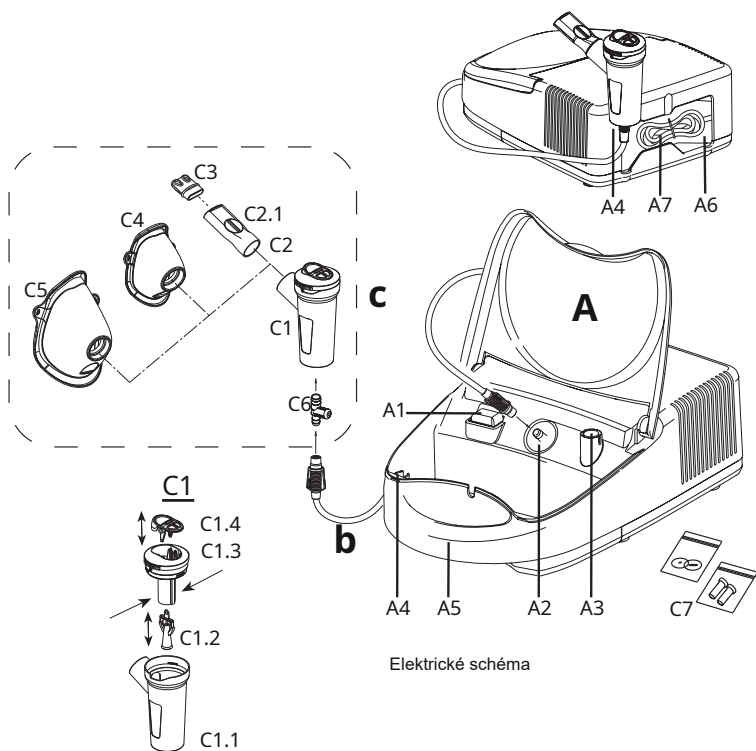

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0217007802

NebulAir+

mod. NEBULAIR

Prístroj na aerosólovú terapiu

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie a prejavili nám dôveru. Naším cieľom je dosiahnuť plnosť spokojnosti našich zákazníkov tým, že im ponúkame inovatívne produkty na liečbu ochorení dýchacích ciest. **Pozorne si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.**

Zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. Zdravotnícka pomôcka určená na domáce použitie na rozprašovanie a podávanie predpísaných liekov resp odporúčané lekárom po zhodnotení celkového stavu pacienta.

Pripomíname, že celý rad produktov Flaem je prezentovaný na webovej stránke www.flaem.it

KOMPONENTY A PRÍSLUŠENSTVO INHALÁTORA

A - Hlavné zariadenie

- A1 - Prepínač
- A2 - Vstup vzduchu
- A3 - Vzduchový filter
- A4 - Držiak rozprašovača
- A5 - Držiak
- A6 - Úložný priestor kábla
- A7 - Napájací kábel

C - Príslušenstvo

- Nebulizér C1 - RF7 Dual Speed Plus
- C1.1 - Spodná časť
- C1.2 - Tryska
- C1.3 - Horná časť
- C1.4 - Volič rýchlosti s ventilom
- C2 - Náustok
- C2.1 - Výdychový ventil
- C3 - Neinvazívna nosová maska
- C4 - Detská maska
- C5 - Maska pre dospelých
- C6 - Manuálne nastavenie inhalácie
- C7 - Súprava na výmenu filtra

b - Vzduchové potrubie

(hlavná jednotka/rozprašovač)

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Zariadenie je určené aj na priame použitie pacientom.
- Pred prvým použitím a pravidelne počas životnosti produktu skontrolujte štruktúrnu integritu zariadenia a napájacieho kábla, aby ste sa uistili, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu. V prípade poškodenia nezasúvajte zástrčku a odneste produkt do autorizovaného servisného strediska FLAEM alebo k dôveryhodnému predajcovi.
- V prípade, že zariadenie nespĺňa požiadavky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko so žiadosťou o vysvetlenie.
- Priemerná životnosť príslušenstva je 1 rok. V prípade intenzívneho používania sa však odporúča vymeniť ampulku každých 6 mesiacov (alebo skôr, ak sa upchá), aby bola zabezpečená účinná liečba.
- V prítomnosti detí alebo osôb odkázaných na cudziu pomoc musí byť zariadenie pod prísny dohľadom dospeléj osoby, ktorá si prečítala tento návod.
- Niektoré časti spotrebiča sú veľmi malé a deti ich môžu prehltnúť, preto ich uchovávajte mimo dosahu detí.
- Dodávané šnúry a káble nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo usmrtenia. Venujte zvláštnu pozornosť deťom a ľuďom so špeciálnymi problémami, pretože nie vždy dokážu správne posúdiť riziká, ktoré s tým súvisia.
- Prístroj nie je určený na použitie s anestetickými zmesami, ktoré sa pri kontakte so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným stanú horľavými.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Udržujte napájací kábel mimo dosahu zvierat (napr. hlodavcov), ktoré by mohli

poškodiť jeho izoláciu.

- Neobsluhujte prístroj mokрыmi rukami. Nepoužíajte prístroj vo vlhkom prostredí (napríklad vo vani alebo v sprche). Neponárajte zariadenie do vody; ak k tomu však dôjde, okamžite odpojte prístroj zo zástrčky. Nevýberajte a nedotýkajte sa zariadenia ponoreného vo vode; najskôr vytiahnite zástrčku. Potom by malo byť zariadenie okamžite odovzdané autorizovanému servisnému stredisku FLAEM alebo predajcovi.
- Prístroj používajte iba v bezprašnom prostredí, inak môže byť terapia nepriaznivo ovplyvnená.
- Neumývajte prístroj pod tečúcou vodou ani ho neponárajte; chráňte zariadenie pred striekajúcou vodou a inými tekutinami.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo do prostredia, ktoré je príliš horúce.
- Nezanášajte ani nevkladajte žiadne predmety do samotného filtra ani do jeho otvoru v zariadení.
- Neblokujte vetracie otvory na oboch stranách zariadenia.
- Zariadenie vždy prevádzkujte na pevnom povrchu bez prekážok.
- Pred každým použitím skontrolujte, či vetracie otvory nie sú upchaté.
- Do vetracích otvorov nevkladajte žiadne predmety.
- Opravy, vrátane výmeny napájacieho kábla, by mal vykonávať iba autorizovaný personál FLAEM na základe pokynov poskytnutých výrobcom. Neautorizované opravy rušia záruku a môžu predstavovať riziko pre používateľa.
- Priemerná životnosť pre každú skupinu kompresorov: F400: 400 hodín, F700: 700 hodín, F1000: 1000 hodín, F2000: 2000 hodín.
- UPOZORNENIE: Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny bez povolenia výrobcu.
- Výrobca, predajca a dovozca sú zodpovední za bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkové parametre len vtedy, ak: a) sa zariadenie používa v súlade s návodom na obsluhu; b) elektrická inštalácia v miestnosti, kde sa zariadenie používa, je vhodná a spĺňa požiadavky platných predpisov.
- Interakcie: Použité materiály na kontakt s liekmi boli testované so širokou škálou liekov. Vzhľadom na rôznorodosť a neustály vývoj liekov však nie je možné úplne vylúčiť interakcie. Odporúča sa použiť liek čo najskôr po otvorení a vyhnúť sa dlhodobému kontaktu s ampulkou.
- Problémy a/alebo poruchy treba hlásiť výrobcovi. Ak je to potrebné, kontaktujte ho aj pre vysvetlenia týkajúce sa používania a/alebo údržby/čistenia.
- Vedľajšie účinky: Materiály použité v zariadení sú biokompatibilné materiály v súlade s platnými požiadavkami Smernice 93/42EC a neskorších dodatkov, avšak alergické reakcie nie je možné úplne vylúčiť.
- Čas potrebný na prechod z uloženého do pracovného stavu je približne 2 hodiny.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred každým použitím si dôkladne umyte ruky a potom prístroj vyčistíte podľa popisu v kapitole „ČISTENIE, DEZINFEKCIA a STERILIZÁCIA“.

Nádoba a príslušenstvo sú na osobné použitie, aby sa zabránilo nožnej kontaminácii. Prístroj je určený na podávanie liečiv a iných látok podávaných inhalačne. Tento druh látky by mal vždy predpisovať lekár. V prípade látok z

nadmernej hustoty, môže byť potrebné zriediť ich vhodným fyziologickým roztokom podľa pokynov lekára. Počas používania sa odporúča chrániť sa pred možným kvapkaním tekutiny.

1. Zapojte napájací kábel (A7) do elektrickej zásuvky, ktorá zodpovedá napätiu špecifikovanému výrobcom pre toto zariadenie. Uistite sa, že v prípade núdze nie je ťažké vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

2. Vložte trysku (C1.2) do hornej časti (C1.3) tak, ako je to znázornené šípkami 2 v "Schéma pripojenia" v C1. Vložte volič rýchlosti s ventilom (C1.4) do hornej časti (C1.3), ako je znázornené na "Schéma zapojenia" v C1. Do spodnej časti naplňte lieky predpísané lekárom (C1.1). Zatvorte rozprašovač otočením hornej časti (C1.3) v smere hodinových ručičiek.

3. Pripojte príslušenstvo, ako je znázornené v časti „Schéma pripojenia“.

4. Pohodlne sa usadíte a držte nebulizér, vložte si náustok do úst alebo použite nosový nástavec alebo masku. Ak používate masku, môžete použiť gumičku, ktorá masku drží na tvári (ako je znázornené na obrázku).

5. Spustíte inhalátor stlačením vypínača (A1) a zhlboka sa nadýchnete a vydýchnete ho.

6. Po vdýchnutí vypnite prístroj a odpojte ho.

VÝSTRAHA: Po použití inhalátora môže dôjsť k usadeninám vo vzduchovej trubici v dôsledku vlhkosti. Odpojte hadicu (B) od rozprašovača a vysušte ju vzduchom produkovaným kompresorom.




AKO POUŽÍVAŤ NEBULIZÉR „RF7 DUAL SPED PLUS“ S SPÍNAČOM RÝCHLOSTI A SYSTÉMOM VENTILU


Prístroj je profesionálny, rýchly a je určený na užívanie všetkých druhov liekov,

vrátane tých najdrahších a je určený aj pre pacientov s chronickými ochoreniami.

Vďaka geometrii vnútorných trubic nebulizéra RF7 Dual Speed+ bola dosiahnutá veľkosť častíc, ktorá je navrhnutá a účinná na liečbu aj dolných dýchacích ciest. Ak chcete urýchliť respiračnú terapiu, nastavte tlačidlo prepínača rýchlosti (C1.4) stlačením prsta na nápis MAX. Pre väčšiu účinnosť respiračnej terapie nastavte volič rýchlosti (C1.4) stlačením prsta na opačnej strane ako je nápis MAX, v tomto prípade dosiahnete optimálnu absorpciu liečiva, minimalizujete jeho rozptyl do okolitého prostredia, vďaka bariérovému systému, ktorý je vybavený rozprašovačom, náustkom a maskou.

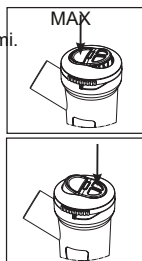


MASKY SOFTTOUCH

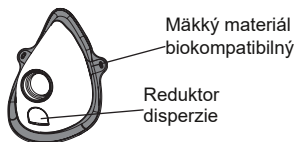


Mäkký materiál
biokompatibilný

Reduktor
disperzie

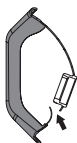

V inhalačnej fáze sa uvula, ktorá slúži ako **Reduktor disperzie**, nakláňa sa smerom dovnútra masky.


Vonkajšia časť masiek "**Jemný dotyk**" bola vyrobená z **mäkkého biokompatibilného materiálu**, ktorý zaručuje optimálne priľnutie k tvári. Okrem toho sú masky vybavené **inovatívnou redukciou rozptylu**. Tieto charakteristické prvky, ktoré odlišujú našu značku, umožňujú lepšiu asimiláciu lieku telom pacienta, a teda **obmedzujú jeho rozptyl**.

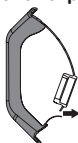


Vo fáze výdychu sa **uvula**, ktorá slúži ako **Reduktor disperzie**, nakláňa smerom k vonkajšej strane masky.

POUŽITIE RUČNEJ KONTROLY VDÝCHNUTIA

Manuálne ovládanie inhalácie (C6) by sa nemalo používať na dosiahnutie konštantnej úrovne inhalácie, najmä u detí alebo ľudí so zdravotným postihnutím. Manuálne ovládanie inhalácie je užitočné na zníženie disperzie liečiva v okolitom prostredí.

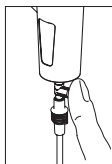

Ak chcete spustiť nebulizáciu, zatvorte otvor na manuálnu nebulizáciu (C6) prstom a pomaly sa zhlboka nadýchnite; odporúča sa na chvíľu zadržať dych, aby sa vdýchnuté kvapôčky aerosólu stihli usadiť vo vnútri tela.

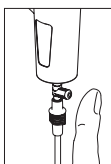

Ak chcete ukončiť nebulizáciu, vyberte prst z otvoru na manuálne ovládanie nebulizácie – týmto spôsobom sa vyhnete plytvaniu liekom a optimalizujete inhaláciu. Nakoniec pomaly vydýchnite.

ČISTENIE, DEZINFEKCIA A STERILIZÁCIA

Pred čistením prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

ZARIADENIE A VONKAJŠIA ČASŤ KÁBLA

Používajte iba vlhkú handričku s antibakteriálnym čistiacim prostriedkom (neabrazívny, bez pridania akýchkoľvek rozpúšťadiel).

DOPLNKY

Otvorte rozprašovač otočením vrchnej časti (C1.3) proti smeru hodinových ručičiek, vyberte trysku (C1.2) a volič rýchlosti (C1.4) zhora (C1.3), ako je znázornené na "Schéma montáže" v časti C1.

Potom postupujte podľa pokynov nižšie. **ČISTENIE - DEKONTAMINÁCIA A DEZINFEKCIA**

DEKONTAMINÁCIA

Pred a po každom použití je potrebné nádobu a príslušenstvo dekontaminovať jedným z nasledujúcich spôsobov.

metóda A: Dekontaminujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6**, s použitím teplej pitnej vody (približne 40 °C) a jemného prostriedku na umývanie riadu (neabrazívneho).

metóda B: Dekontaminujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6** v umývačke riadu pomocou cyklu horúcej vody.

metóda C: Dekontaminujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6** ponorením do roztoku 50 % vody a 50 % bieleho octu, potom ich opláchnite veľkým množstvom teplej pitnej vody (približne 40 °C).

Čistenie za účelom DEZINFEKcie nájdete v časti DEZINFEKcia.

Po dezinfekcii príslušenstvo dôkladne pretrepte aby ste odstránili čo najviac vody a položte na papierovú utierku alebo vysušte prúdom teplého vzduchu (napr. fénom).

DEZINFEKcia

Po dekontaminácii nádoby a príslušenstva ich dezinfikujte jedným z nasledujúcich spôsobov.

metóda A: Dezinfikovateľné príslušenstvo: **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6**.

Zaobstarajte si dezinfekčný prostriedok patriaci do skupiny elektrolytických oxidačných látok s obsahom chlóru (účinná látka: chlórnan sodný) určený na dezinfekciu. Dá sa kúpiť v lekární.

prevedenie:

Naplňte nádrž dostatočnej veľkosti, aby sa do nej zmestili všetky jednotlivé položky, ktoré sa majú dezinfikovať, roztokom pitnej vody a dezinfekčného prostriedku, pričom dodržujte pomery uvedené na obale takéhoto dezinfekčného prostriedku.

- Každú jednotlivú časť úplne ponorte do roztoku, pričom dávajte pozor, aby sa v kontakte s komponentmi nevytvorili vzduchové bubliny. Komponenty nechajte ponorené v roztoku po dobu uvedenú na obale dezinfekčného prostriedku, podľa zvolenej koncentrácie roztoku.

- Odstráňte dezinfikované komponenty a opláchnite ich vo veľkom množstve vlažnej pitnej vody.

- Roztok zlikvidujte podľa odporúčania výrobcu dezinfekčného prostriedku.

metóda B: Dezinfikujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6** varením počas 10 minút; používajte demineralizovanú alebo destilovanú vodu, aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa.

metóda C:Dezinfikujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6** pomocou parného sterilizátora (nie v mikrovlnnej rúre). Postupujte podľa pokynov dodaných so sterilizátorom. Aby bola dezinfekcia účinná, vyberte si sterilizátor s pracovným cyklom aspoň 6 minút. Po dezinfekcii príslušenstvo dôkladne pretrepte aby ste sa zbavili prebytočnej vody a položte na papierovú utierku alebo vysušte prúdom teplého vzduchu (napr. fénom).

KLINICKÉ ALEBO NEMOCNÍČNÉ ČISTENIE – DEZINFEKCIA A STERILIZÁCIA

Pred dezinfekciou alebo sterilizáciou je potrebné nádobu a príslušenstvo dekontaminovať jedným z nasledujúcich spôsobov.

metóda A:Dekontaminujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6**, s použitím teplej pitnej vody (približne 40 °C) a jemného prostriedku na umývanie riadu (neabrazívneho).

metóda B:Dekontaminujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6** v umývačke riadu pomocou cyklu horúcej vody.

DEZINFEKCIA

Dezinfikovateľné príslušenstvo: **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5-C6**.

Zaobstarajte si dezinfekčný prostriedok patriaci do skupiny elektrolytických oxidačných látok s obsahom chlóru (účinná látka: chlórnan sodný) určený na dezinfekciu. Dá sa kúpiť v lekárni.

prevedenie:

- Naplňte nádrž dostatočnej veľkosti, aby sa do nej zmestili všetky jednotlivé položky, ktoré sa majú dezinfikovať, roztokom pitnej vody a dezinfekčného prostriedku, pričom dodržujte pomery uvedené na obale takéhoto dezinfekčného prostriedku.
 - Každú jednotlivú časť úplne ponorte do roztoku, pričom dávajte pozor, aby sa v kontakte s komponentmi nevytvorili vzduchové bubliny. Komponenty nechajte ponorené v roztoku po dobu uvedenú na obale dezinfekčného prostriedku, podľa zvolenej koncentrácie roztoku.
 - Odstráňte dezinfikované komponenty a opláchnite ich vo veľkom množstve vlažnej pitnej vody.
 - Roztok zlikvidujte podľa odporúčania výrobcu dezinfekčného prostriedku. Ak chcete vykonať aj STERILIZÁCIU, prejdite do sekcie STERILIZÁCIA.
- Po dezinfekcii príslušenstvo dôkladne pretrepte, aby ste sa zbavili prebytočnej vody a položte na papierovú utierku alebo vysušte prúdom teplého vzduchu (napr. fénom).

STERILIZÁCIA

Sterilizovateľné príslušenstvo: **C1 (zostavený nebulizér)-C2-C3-C4-C5**.

Vybavenie: Parný sterilizátor s frakcionovaným vákuom a pretlakom, v súlade s EN 13060.

prevedenie:

Každý jednotlivý komponent, ktorý sa má čistiť, zabalte do systémového alebo sterilného bariérového obalu podľa EN 11607. Vložte zabalené komponenty do parného sterilizátora. Vykonajte sterilizačný cyklus podľa návodu na použitie prístroja, zvolte teplotu 134°C a čas prvých 10 minút.

Ukladací priestor:Sterilizované komponenty by sa mali skladovať podľa popisu v príručke k systému alebo v sterilnom bariérovom obale.

Postup sterilizácie je validovaný podľa ISO 17665-1.

Po použití uložte prístroj a príslušenstvo na suchom mieste chránenom pred prachom.

VÝMENA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Prístroj je vybavený vzduchovým filtrom (A3), ktorý je potrebné vymeniť, keď je znečistený alebo zmení farbu. Použitý filter neumývajte ani nepoužívajte. Filter by sa mal pravidelne vymieňať, aby sa zabezpečil optimálny výkon kompresora.


Kontaktujte svojho regionálneho zástupcu.

Ak chcete vymeniť filter:

Vložte plochý skrutkovač medzi okraj filtra a telo.

Nadvihnite filter a vyberte ho otočením a potiahnutím nahor. Filter je navrhnutý tak, aby vždy zostal bezpečne na svojom mieste. Počas používania filter nevymieňajte.

Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely Flaem. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak sa použijú neoriginálne náhradné diely alebo príslušenstvo.

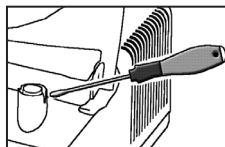

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred začatím akejkoľvek operácie vypnite zariadenie a odpojte zástrčku od kábla zo zásuvky.

PROBLÉM	PRÍČINA	OPRAVA
Zariadenie nefunguje	Napájací kábel nie je správne pripojený k zariadeniu alebo elektrickej zásuvke	Zasuňte napájací kábel správne do zásuvky.
Prístroj nestrieka alebo strieka málo	V rozprašovači nie je žiadny liek.	Vložte príslušné množstvo lieku do rozprašovača.
	Nebulizér nezostal nainštalovaný správne.	Odstráňte a správne zostavte nebulizér podľa schémy zapojenia na kryte.
	Tryska rozprašovača je upchatá.	Demontujte rozprašovač, vyberte trysku a vyčistite ju. Nečistenie rozprašovača od zvyškov liekov ohrozuje jeho účinnosť a prevádzku. Dôsledne dodržujte pokyny v časti ČISTENIE, DEZINFEKCIA a STERILIZÁCIA.
	Vzduchová hadica nie je správne pripojená k zariadeniu.	Skontrolujte správne spojenie medzi vzduchovým otvorom zariadenia a príslušenstvom (pozri schému zapojenia na obale).
	Vzduchová hadica je pokrčená, poškodená alebo zvlhčená.	Odviňte kábel a skontrolujte, či nie je pokrčený alebo deravý. V prípade potreby ho vymeňte.
	Vzduchový filter je špinavý	Vymeňte filter.
Zariadenie funguje hlasnejšie ako zvyčajne	Filter nie je správne vložený do otvoru.	Filter zasuňte správne až na doraz.

Ak po skontrolovaní vyššie opísaných podmienok zariadenie stále nefunguje správne, kontaktujte svojho predajcu alebo najbližšieho autorizovaného predajcu.

ČASTI

Popis

- Nebulizér RF7 Dual Speed Plus + náustok s ventilom + neinvazívna nosová zátka
- Vzduchové potrubie
- Detská maska + maska pre dospelých
- Vzduchový filter (2 kusy)

kód

ACO464P
ACO578P
ACO462P
ACO164P

SYMBOLY



certifikát TÜV



Medical CE pre zdravotnícke pomôcky, ref. r. 93/42 EHS v platnom znení



Zariadenie triedy II



Dôležité upozornenia: prečítajte si prosím návod na použitie



"VYPNUTÉ" pre nejaký hardvér



"ON" zapnuté pre nejaký hardvér



PHTHALATES & BPA FREE

V súlade s európskymi Normami EN 10993-1
Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok a 93/42/EHS
Smernica o zariadeniach.
Neobsahuje ftaláty. Kompatibilné s: Reg. (ES) č. 1907/2006



Minimálna a maximálna teplota okolia

SN

Sériové číslo zariadenia



Producent



Použité diely typu BF



Striedavý prúd



Minimálna a maximálna vlhkosť vzduchu

IP21

Stupeň ochrany krytu: IP21.
(Chránené proti pevným predmetom väčším ako 12 mm. Chránené proti vsunutiu prsta. Chránené proti zvisle padajúcim kvapkám vody.)



Minimálny a maximálny atmosférický tlak

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Toto zariadenie bolo navrhnuté v súlade s aktuálnymi požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu (EN 60601-1-2).

Zdravotnícke elektrické zariadenia vyžadujú osobitnú pozornosť EMC počas inštalácie a používania. Preto je potrebné ich inštalovať a používať v súlade s pokynmi výrobcu.

Riziko možného elektromagnetického rušenia s inými zariadeniami. Mobilné alebo prenosné rádiové a RF telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny alebo bezdrôtové pripojenia) môžu rušiť lekárske zariadenia.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.flaemnuova.it.

Zariadenie môže byť citlivé na elektromagnetické rušenie v prítomnosti iných zariadení používaných na určité diagnózy alebo liečby.

TECHNICKÉ DÁTA

Mod.: NEBULAIR

Napätie:	230V~ 50Hz 210 VA	115V~60Hz 230VA	220V ~ 60Hz 230VA	100V~50/60Hz 230VA
Schválenie:				

maximálny tlak:	3,5 ± 0,5 bar
Kapacita kompresora:	cca 14 l/min
Hlasitosť:	približne 55 dB(A)
Prevádzkový režim:	nepretržitá práca
Rozmery (Š) x (H) x (V):	Rozmer 20x30x10 cm
Váha:	2 400 kg

Pracovné podmienky:

teplota:	Min 10 °C; Max 40 °C
vlhkosť vzduchu:	Min 10 %; Max 95 %
atmosferický tlak:	Min 69 kPa; Maximálne 106 kPa

Podmienky skladovania:

Teplota:	min -25 °C; Max 70 °C
vlhkosť vzduchu:	Min 10 %; Max 95 %
atmosferický tlak:	Min 69 kPa; Maximálne 106 kPa

POUŽITÉ DIELY

Zariadenie typu BF:	Časti (C2, C3, C4, C5)
---------------------	------------------------

Nebulizér RF7 DUAL SPEED PLUS

Minimálna kapacita:	2 ml
Maximálna kapacita:	8 ml
Pracovný tlak (s rozprašovačom):	1,30 barov.

	prepínač rýchlosti s ventilom C1.4 max	z prepínač rýchlosti ventil C1.4 pri naplnení MAX
(1)Nebulizačná kapacita:	cca 0,65 ml/min.	cca 0,29 ml/min.
(2)MMAD:	2,38 µm	2,21 µm
(2)Dýchatelná frakcia < 5 µm FPF):	81,5 %	84,2 %

(1)Uvedené údaje sú v súlade s interným postupom Flaem Nuova I29-P07.5

(2)Charakterizácia in vitro vykonaná spoločnosťou TÜV Rheinland Italia Srl v spolupráci s Univerzitou v Parme a v súlade s európskou normou pre zariadenia na aerosolovú terapiu - EN 13544-1:2007 + A1. Viac informácií je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



V súlade so smernicou 2012/19/ES symbol umiestnený na zariadení znamená, že je predmetom selektívneho zberu a malo by sa s ním nakladať v súlade s týmto označením. Užívateľ je preto povinný odovzdať (alebo zabezpečiť zber) takýto odpad na zberné miesta selektívneho zberu fungujúceho na základe povolení vydaných miestnymi úradmi, alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia za rovnaké účel. Separovaný zber odpadov a ich následné spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie umožňujú rozvoj výroby zariadení s využitím recyklovaných materiálov a znižujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie, ktoré vznikajú pri nesprávnom nakladaní s odpadmi.