

LANAFORM Nails Care

Návod na obsluhu

Sme radi, že vám LANAFORM® môže ponúknuť výhody technického pokroku v starostlivosti o telo. Prenosná sada Nails Care je určená na starostlivosť o ruky a nohy. Je vybavená všetkým príslušenstvom, ktoré potrebujete na tvarovanie a vyhladzovanie nechťov vašich rúk a nôh. Okrem toho obsahuje Nails Care nástavce na odstránenie hrubej kože na rukách a otlakov alebo hrubej kože na nohách. Jeho rotujúce brúsne kotúče odstraňujú zvyšky odumretej pokožky. Pravidelným používaním tohto produktu budú vaše ruky a nohy mäkkšie a krajšie, vaše nechty budú silnejšie a pevnejšie.

Pred prvým použitím si preštudujte tento návod na obsluhu, predovšetkým všetky bezpečnostné inštrukcie.

- Tento prístroj je určený iba na domáce použitie.
- Nepoužívajte toto zariadenie viac ako 20 minút naraz s 15 minútovou prestávkou pred ďalším použitím.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie ľuďmi, vrátane detí, s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo ľuďmi, ktorým chýbajú skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ neboli pod dozorom alebo vopred poučení o tom, ako zariadenie používať osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skontrolujte teplotu zariadenia pred použitím na citlivej časti tela.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach s aerosólmi, výparmi alebo tam, kde je podávaný kyslík.
- Nepoužívajte toto zariadenie pod krytom alebo pod vankúšom. To môže spôsobiť prehriatie, čo môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti akejkoľvek časti tela, ktorá je veľmi citlivá, ani na chorých alebo na zranených častiach tela.
- Nepoužívajte "Nails Care" na zapálenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku alebo na akejkoľvek oblasti zasiahnutej dermatologickým problémom.
- Nepoužívajte prístroj na vyrážky, bradavice alebo kĺčové žily.
- Ošetrovanie pomocou "Nails Care" by malo byť jednoduché a bezbolestné. Ak máte pocit podráždenia u nechťov alebo kože alebo nepríjemné pocity v rukách pri používaní tohto výrobku, prestaňte ho dočasne používať. Ak pretrvávajú neprimerané reakcie, poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte tento prístroj bez konzultácie s lekárom, ak ste tehotná alebo dojčíte, ak máte tetovanie, vyrážku alebo iné ochorenie kože, ak máte nejaké neobvyklé kožné sfarbenie, ak ste začali užívať akýkoľvek liek, alebo ak máte veľmi citlivú pokožku. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím lekárom.
- Používajte toto zariadenie iba podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti.

Fotografie a iné obrázky produktu v tomto návode alebo na obale predstavujú čo možno najvernejšie znázornenie výrobku, nemožno však zaručiť, že výrobku dokonale zodpovedajú.

Balenie prístroja Nails Care obsahuje (obr. 1):

Fig. 1



- A) Hlavná jednotka
- B) Prepínač otáčok (0-1-2)
- C) Ochranný kryt
- D) Rotačné brúsne kotúče na mozole a stvrdnutú kožu (hrubé a jemné zrna)
- E) Malé rotujúce brúsne kotúče pre jemnejšie ošetrovanie (hrubé a jemné zrna)
- F) Leštiaci kužeľ
- G) Predĺžený zafírový valček
- H) Jemnozrnný zafírový kužeľ
- I) Zafírový disk
- J) Priestor pre batérie (2 x AA 1.5V nie je súčasťou dodávky)


Návod na použitie

- 1) Prepnete prepínač do polohy "0" a vložte batérie. Skontrolujte polaritu a nasadte viečko krytu batérií.
- 2) Pripevnite do hlavnej jednotky ochranný kryt (voliteľný) a príslušenstvo, ktoré chcete používať.
- 3) Začnite ošetrovanie voľbou rýchlosti otáčania (1 alebo 2) pomocou spínača s reguláciou otáčok (B). Odporúčame vám začať voľbou rýchlosti „1“, zoznámiť sa s ňou. Všeobecne platí, že rýchlosť "1" sa používa na ošetrovanie nechťov na rukách a nohách. Rýchlosť "2" sa používa na liečbu silných mozolov, zrohovatej a odumretej kože.
- 4) Pre väčšiu efektivitu a lepšie výsledky ošetrite pokožku na suchu. Po ošetrovaní odporúčame použiť hydratačný krém na ošetrované miesta.

Sada obsahuje 8 kusov výmenného príslušenstva na ošetrovanie v profesionálnej kvalite v domácnosti (obr.2):

- a) jemnozrnný zařířový kuřel je ideálnym doplnkom na odstránenie mozolov na rukách. Pritlačte ľahko na miesta, ktoré majú byť ošetrené. Jemnozrnný zařířový kuřel je určený pre rovné plochy kože.
- b) Brúsne kotúče sú ideálne na liečbu nôh, päty, prstov rovnako ako na všetky zakrivené plochy s mozolmi a zrohovatenou kořou. Menšie disky vám pomôžu dosiahnuť menšie časti tela, ako sú medzi prstami na nohách. Vřdy ošetríte väčřiu plochu, nezostávajú na rovnakom mieste.
- c) Zařířovým nadstavcom môžete odstrániť stvrdnutú kořu a ďalšie nedostatky v rohoch nechťov.
- d) Zařířový tvarovací disk slúži na tvarovanie nechťov rýchlejšie, než s tradičným pilníkom. Vřdy začínajte prácu s pomalou rýchlosťou rotácia "1".
- e) Leřtiaci kuřel môže byť použitý na leřtenie nechťov na rukách a nohách po manikúre či pedikúre.

Fig. 2

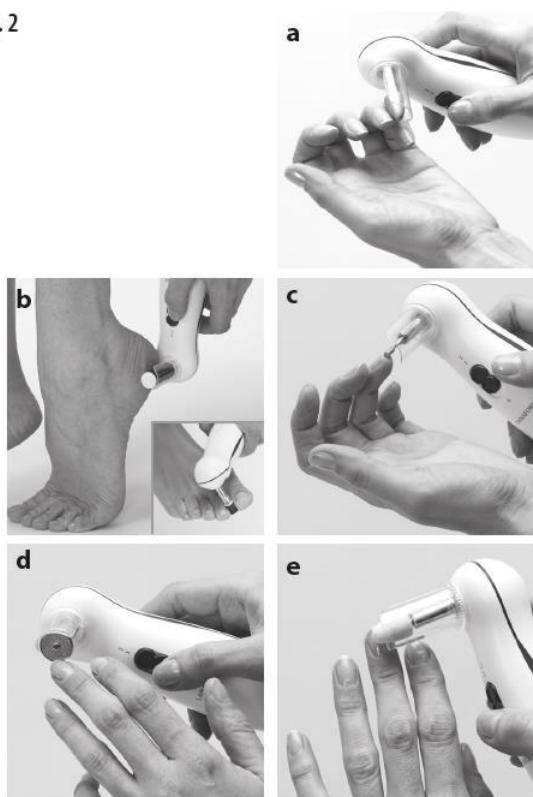

Záruka

Záruka na tento výrobok spoločnosti LANAFORM® sa nevztáhuje na škody spôsobené akýmkoľvek nevhodným alebo chybným používaním, nehodou, pridaním nezlučiteľného príslušenstva, modifikáciou výrobku alebo v dôsledku všetkých iných okolností vymykajúcich sa kontrole spoločnosti LANAFORM®.

Spoločnosť LANAFORM® odmieta všetku zodpovednosť v prípadoch náhodného, konšekutívneho alebo špecifického poškodenia.

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú limitované na celkové obdobie dvoch rokov počnúc dňom prvého zakúpenia výrobku.

V prípade reklamácie spoločnosť LANAFORM® opraví alebo nahradí Váš kozmetický prístroj Nails Care v závislosti od druhu vady. Záruka je platná výhradne pre opravy uskutočnené v servisnom stredisku LANAFORM®. Akékoľvek údržby alebo opravy výrobku vykonané inými opravárskymi službami ako servisným strediskom LANAFORM® anulujú všetky nároky na plnenie tejto záruky.

Distribútor:

INTERPHARM Slovakia, a.s.
Uzbecká 18/A
821 06 Bratislava

Tel: +421 2 402 00 400

www.interpharm.sk

Skladovanie

Po vyčistení a vysušení prístroja ho uložte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu detí.



Rady týkajúce sa likvidácie odpadu

Obal je zložený z materiálov, ktoré nijako neohrozujú životné prostredie a možno ich odovzdať na recykláciu do zberných nádob

s triedeným odpadom, do obecného zberného alebo recyklačného strediska. Papierový obal je možné vyhodiť do papierového odpadu. Obalové fólie treba odovzdať do nádob s triedeným odpadom, obecného zberného alebo recyklačného strediska. Prístroj po ukončení životnosti odovzdajte do zbernej nádoby na elektroodpad alebo do zberného dvora. Elektroodpad nepatrí do domového odpadu!