




Sínusový inhalátor

s vonnými náplňami







VH200E

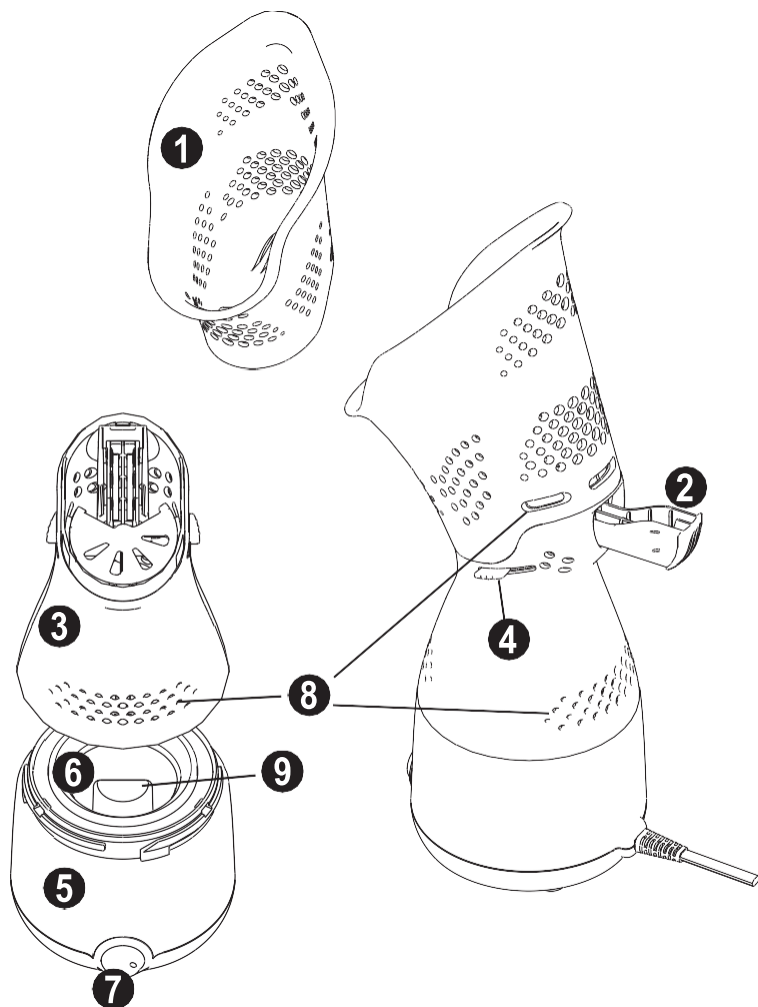



Časti:

1. Maska 2. Zásobník na VapoPads 3. Vrchné puzdro
4. Ovládače parných diskov 5. Základňa 6. Vodná nádrž
7. Vypínač 8. Otvory 9. Vyhrievací prvok




A)

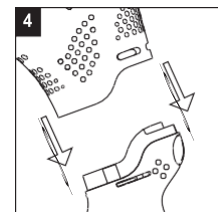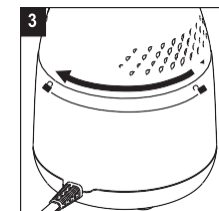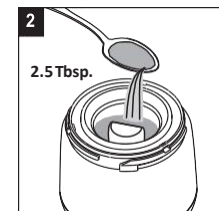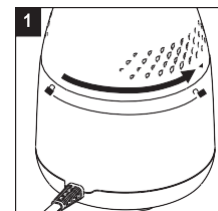

B)

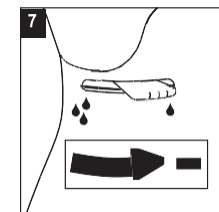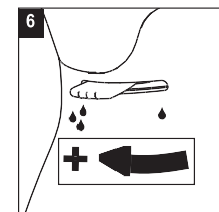

C)

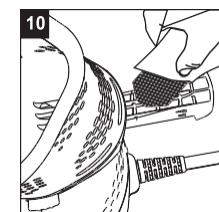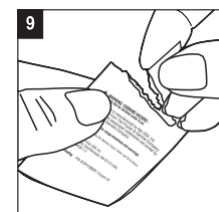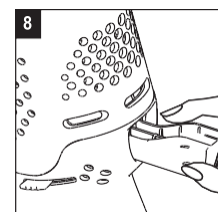

Používajte iba s náplňami VapoPads Rozmarín & Levanduľa (VBR7) alebo Mentol (VH7)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Túto príručku uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Tieto pokyny sú k dispozícii aj na webovej stránke. Navštívte stránku www.hot-europe.com.

VÝSTRAHA:

- Pred použitím tohto inhalátora si prečítajte všetky pokyny.
- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak im bolo poskytnuté poučenie o používaní tohto zariadenia bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
- Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie zo siete
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Inhalátor umiestnite vždy na pevný a rovný povrch. Tento inhalátor nemusí správne fungovať na nerovnom povrchu.
- Inhalátor umiestnite na miesto, kde naň nemajú dosah deti
- Inhalátor nedávajte do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ako sú kachle, radiátory a ohrievače.
- Inhalátor nepoužívajte vonku.
- Ak chcete inhalátor odpojiť, najskôr vypnite zariadenie, potom ho chyťte za zástrčku a vytiahnite ho zo zásuvky v stene. Nikdy neťahajte za kábel.
- Inhalátor nikdy nenakláňajte ani sa nepokúšajte s ním hýbať, keď je v prevádzke alebo je naplnený vodou. Pred premiestnením inhalátor VYPNITE.
- Tento inhalátor vyžaduje pravidelné čistenie. Postupujte podľa pokynov na ČISTENIE. Inhalátor nikdy nečistite iným spôsobom, ako je uvedené v tejto príručke.
- Výrobok nekladte priamo na drevený nábytok ani na iné povrchy, ktoré by mohli byť mokré. Výrobca nebude brať zodpovednosť za škody na majetku spôsobené rozliatím alebo vytekaním.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím prístroja nezabudnite na nasledovné prvky:

- Z prístroja odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím sa odporúča inhalátor dezinfikovať. Pozrite si pokyny na čistenie
- Pre správne prúdenie vzduchu vyberte pevné, vodorovné miesto vo vzdialenosti minimálne 15 cm od stien.
- Inhalátor položte na povrch odolný voči vode.

NÁVOD NA OBSLUHU

PLNENIE – pozrite bod A

- Úplne rozmotajte kábel. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť prehriatie a možné nebezpečenstvo požiaru. **NEPOUŽÍVAJTE** s predlžovacím káblom. Inhalátor umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Horné puzdro od základne odblokujte otočením horného krytu proti smeru hodinových ručičiek (1). Po úplnom odomknutí sa šípka na hornom kryte zarovná so symbolom odomknutia na základni. Zdvihnite horný kryt priamo a odložte stranou.
- Naplňte zásobník s približne 2,5 lyžicami (40 ml) studenej vody z vodovodu (2).
- Používajte iba s vodou. Do vodnej nádrže nepridávajte žiadne éterické oleje, lieky alebo inhalačné kvapaliny. Ak sa do vody pridá čokoľvek, môže to spôsobiť bezpečnostné riziko.
- Horný kryt umiestnite na základňu a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte (3). Pri úplnom uzamknutí budete cítiť kliknutie a šípka na hornom kryte sa vyrovná so symbolom zámku na základni.
- Položte masku na horný kryt a jemne zatlačte nadol, aby ste sa uistili, že maska je zabezpečená (4).

UPOZORNENIE: Inhalátor NIKDY neohýbajte, nenamáhajte, netraste ním ani ho nenakláňajte, pokiaľ je v prevádzke alebo keď obsahuje horúcu vodu. Po zapnutí inhalátora NEODSTRÁŇUJTE masku ani horný kryt. Para sa vyrába pomocou vriacej vody; nakláňanie môže spôsobiť rozliatie vody a možné popáleniny. Neblokujte žiadne vetracie otvory.

UPOZORNENIE: Nenapĺňajte viac vody ako je dané.

UPOZORNENIE: NEVYPÍNAJTE INHALÁTOR S MOKRÝMI RUKÁVMI.

POZOR: Horúca para

- Pripojte kábel k elektrickej zásuvke. **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel. Prepínač zapnite / vypnite do polohy ON. Kontrolné svetlo sa rozsvieti.
- Parný inhalátor do 5tich minút začne vyrábať paru. Buďte opatrní, nádrž na vodu a voda sa zahrejú.
- Položte tvár na masku (5). Upravte vzdialenosť podľa svojej citlivosti na teplotu pokožky. Dýčajte nosom a ústami, do ktorých vdychujete pary.
- Pokračujte v liečbe po dobu 5 až 20 minút.

NASTAVENIE INTENZITY PARY

- Pre viac pary: Posúvajte ovládanie parného disku v smere hodinových ručičiek, aby ste dosiahli maximálnu paru (6).
- Pre menšiu paru: Posuňte ovládač parného disku proti smeru hodinových ručičiek, aby ste dosiahli minimálnu paru (7). Ak je liečba kedykoľvek príliš intenzívna, okamžite ju zastavte.
- Po dokončení liečby prepnite vypínač do polohy OFF. Kontrolka zhasne. Odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred premiestnením alebo opätovným naplnením nechajte spotrebič aspoň 20 minút vychladnúť (pozri časť Starostlivosť a čistenie). **NEPOUŽÍVAJTE parný inhalátor, keď je prázdny. POZNÁMKA:** Parný inhalátor sa automaticky vypne, keď dôjde voda. Ak k tomu dôjde, prepnite vypínač do polohy OFF a odpojte zariadenie.

NÁVOD NA POUŽITIE NÁPLNÍ

Váš parný inhalátor sa môže používať s náplňami VapoPads až 8 hodín. Súčasťou zariadenia sú dve bezplatné vzorky mentolu VapoPads.

Ak chcete používať jednotku s vôňavými vankúšikmi, uistite sa, že je jednotka VYPNUTÁ a postupujte podľa týchto pokynov:

- Opatrne vysuňte zásobník VapoPads zo zadnej strany horného krytu (8). Poznámka: Zásobník vysúvajte iba von. Nepokúšajte sa odpojiť zásobník od horného krytu.
- Otvorte vrečko VapoPad odtrhnutím zárezu na obale (9). NEDOTÝKAJTE sa podložky rukami. Ak sa dotknete podložky, nepretierajte si tvár ani oči, pretože to môže spôsobiť podráždenie.
- Vložte VapoPad so zahnutým koncom do prednej časti zásobníka (2). Môžete vložiť až dve náplne, jednu do každej štrbiny zásobníka VapoPads. Zatvorte zásobník VapoPads.
- Keď sú náplne už suché a nevoňajú, vyhoďte ich.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE parný inhalátor, ak zásobník VapoPads chýba alebo nie je zaistený.

Tento parný inhalátor sa neodporúča používať deťmi.



VAROVANIE:

Náplň môže predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. H317 Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla. P333 + P313 Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť

Zloženie: eukalyptový olej, mentol, glykol, cédrový listový olej a ďalšie 2 extra mentolové náplne.



Držte mimo dosahu detí a domácich miláčikov

+36 m Nepoužívajte pre dojčatá mladšie ako 36 mesiacov dlhšie ako 16 hodín za deň alebo viac ako 2 náplne za deň

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

UPOZORNENIE: vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a pred čistením nechajte parný inhalátor aspoň 20 minút vychladnúť.

Po každom použití: Odstráňte masku a horný kryt a utrite dosucha čistou handričkou alebo papierovou utierkou. Ak zostane vo vodnej nádrži všetka voda, vylejte vodu a utrite vodnú nádrž a základňu suchou, čistou handričkou alebo papierovou utierkou. NIKDY neponárajte základňu do vody alebo inej tekutiny.

- Dajte späť vrchný kryt a masku; uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

TÝŽDŇOVÉ ČISTENIE

- Odstráňte masku a horný kryt.
- Nalejte do vodnej nádrže 40 ml neriedeného destilovaného bieleho octu a nechajte stáť 10 minút.
- Vyprázdňte destilovaný biely ocot a vypláchnite vodnú nádrž čerstvou čistou vodou z vodovodu. Dajte pozor, aby sa voda nedostala do elektrických priestorov.
- Zásobník vody a základňu osušte čistou handrou alebo papierovou utierkou.
- Masku umyte jemným mydlom a teplou vodou a potom všetko mydlo dôkladne opláchnite čistou vodou z vodovodu. Osušte čistou handrou alebo papierovou utierkou.
- Umiestnite späť horný kryt a masku. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Ak chcete zásobník VapoPads vyčistiť, navlhčite špičku bavlneného tampónu a utrite štrbiny.

POZNÁMKA: Vrchný kryt je vhodný do umývačky riadu. Môže sa umývať v hornom koši umývačky riadu alebo ručne, ako je uvedené v pokynoch. NEUMIESTNUJTE do spodného koša umývačky riadu. NEPOKÚŠAJTE sa rozobrať horný kryt. Ohrievací článok sa nikdy nesmie vkladať do umývačky riadu.

SKLADOVANIE

Postupujte podľa pokynov na čistenie a produkt dôkladne vysušte.

ZNEŠKODNENIE



Toto zariadenie je v súlade s legislatívou 2012/19/EU o recyklácii po skončení životnosti.

Symbol preškrtnutého smetného koša symbolizuje, že je potrebné výrobok po skončení jeho životnosti recyklovať oddelene od domového odpadu. Neodstraňujte spotrebič do bežného domového odpadu. Požiadajte miestny úrad o pomoc s odstraňovaním.

ZÁRUKA

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si účtenku ako dôkaz o nákupe. Potvrdenie sa musí predložiť pri uplatnení nároku v rámci príslušnej záručnej lehoty. Nárok na záruku nebude platný bez dokladu o kúpe. Na vaše zariadenie sa poskytuje záruka dva roky (2 roky) od dátumu zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo spracovania, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní; chybné zariadenia spĺňajúce tieto kritériá budú bezplatne vymenené.

Záruka NEZARUČUJE chyby alebo škody spôsobené zlým používaním alebo nedodržaním pokynov používateľa. Záruka sa stáva neplatnou, ak je zariadenie otvorené, manipulovalo sa s ním alebo sa používalo s inými časťami alebo príslušenstvom alebo ak opravy vykonávajú neoprávnené osoby.

Príslušenstvo a spotrebný materiál nie sú vrámci záruky. Požiadavky na podporu nájdete na stránke www.hot-europe.com/support alebo vyhľadajte kontaktné informácie servisu na konci tejto príručky pre používateľa. Táto záruka sa vzťahuje iba na Európu, Rusko, Stredný východ a Afriku. Nevzťahuje sa na Veľkú Britániu.

PODMIENKY PREDAJA

Kupujúci preberá zodpovednosť za správne používanie a starostlivosť o toto zariadenie v súlade s týmito vytlačenými pokynmi. Kupujúci alebo užívateľ sa musí sám rozhodnúť, kedy a ako dlho používať spotrebič.

POZNÁMKA: AK MÁTE PROBLÉM S INALÁTOROM PROSÍM NEOPRAVUJTE HO SAMI, OBRÁŤTE SA NA SVOJHO PREDAJCU

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s elektromagnetickou smernicou 2014/30 / EÚ, smernicou o nízkom napätí 2014/35 / EÚ a smernicou RoHS 2011/65 / EÚ. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť.

Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	OPRAVA
Hlavný spínač je zapnutý a kontrolka napájania nesvieti	Jednotka nie je zapojená	Zapojte jednotku
	Na výstupe nie je napájané	Skontrolujte obvody, poistky, skúste inú zásuvku
Voda preteká z vodnej nádrže	Jednotka bola naplnená nad rysku maximálneho naplnenia.	Prázdna jednotka. Osušte a potom doplňte vodou, pričom dbajte nato, aby ste nenaplnili celú rysku nad max.naplnenie
Inhalátor nevyrába paru alebo produkuje len málo pary	Vo vodnej nádrži nie je voda	Naplňte nádrž
	Jednotka nie je umiestnená na pevnom a rovnom povrchu	Umiestnite inhalator na pevný a rovný povrch
	Minerálne ložiská na vykurovacom telese	Vyčistite ložiská vykurovacieho telesa
	Vondá nádržka sa umyla s čistiacim prostriedkom, ale nebola dostatočne opláchnutá.	Vypustite vodu a riadne vypláchnite s teplou vodou.