




**Certifikovaný alkohol test
dle normy NFX 20-70**

NÁVOD K POUŽITÍ

**Vyčkejte alespoň 20 minut od
požití poslední dávky alkoholu.**

- 1** Odlomte malé koncovky z obou stran
testeru. Vysypte bílé krystaly z obou stran.

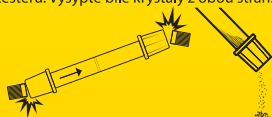

- 2** Zhluboka se nadechněte a vydechněte celý
objem vzduchu z plic do testeru. Následně
toto zopakujte.



- 3** Zhruba za 3 minuty odečtěte výsledek
porovnáním barvy krystalů se vzorníkem níže.

0,0 ‰



0,2 ‰



0,5 ‰



1,0 ‰



**ALKOHOL TEST
JEDNORÁZOVÝ**

CERTIFIKOVANÝ

Datum expirace:



Work And Road Safety Corporation s.r.o.
Kolbenova 610/26, 19000 Praha